



UROMONITOR

**Instructions pour le prélèvement d'échantillons,
le filtrage et l'expédition**

UROMONITOR® Contenu du kit de prélèvement d'urine

3 filtres

Une seringue de 10 ml

1 sac en plastique hermétique

1 autocollant UROMONITOR®

Une boîte en carton

1 DHL Express Étiquette

2 couvertures pour les filtres

Collecte et traitement échantillon

1. COLLECTION

1.1 Recueillir l'urine dans un flacon de collecte.

(Non fourni dans le kit UROMONITOR®)

Procéder immédiatement à la filtration ou stocker l'échantillon d'urine à 4 ° C jusqu'au moment de filtrage (une période maximum de 4 heures), afin de préserver la qualité de l'échantillon et d'éviter toute contamination.




2. FILTRATION

2.1. Prendre 10 ml d'échantillon d'urine à l'aide de la seringue (Figure 2.1).

2.2. Visser un filtre à l'extrémité de la seringue (Figure 2.2)

2.3. Tirer le piston de la seringue pour faire passer la totalité du volume de l'urine à travers le filtre dans un récipient d'élimination (figure 2.3).

2.4. Dévisser le filtre et répétez les étapes 2.1 à 2.3 jusqu'à ce que l'urine ou les filtres fournis soient à court.

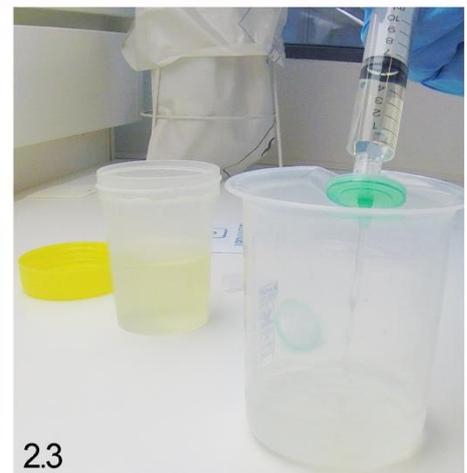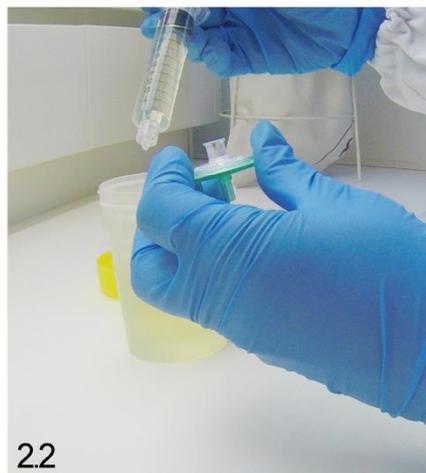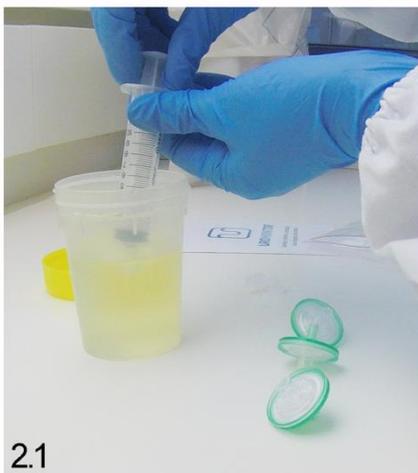


IMPORTANT: Quel que soit le volume d'urine, le filtrage doit toujours être fait par au moins deux filtres.

Si le filtre s'effondre ou le flux d'urine s'arrête, changer le filtre par l'un des autres qui sont disponibles et procéder à l'examen de l'échantillon.

3. EXPÉDITION

3.1. Emboitez les filtres les uns dans les autres et couvrez les extrémités libres avec les capuchons fournis; placer les filtres dans le sac en plastique fourni avec le kit de filtration UROMONITOR® d'urine (figure 3.1) et expédier celui-ci comme expliqué dans la section « Instructions d'expédition ».

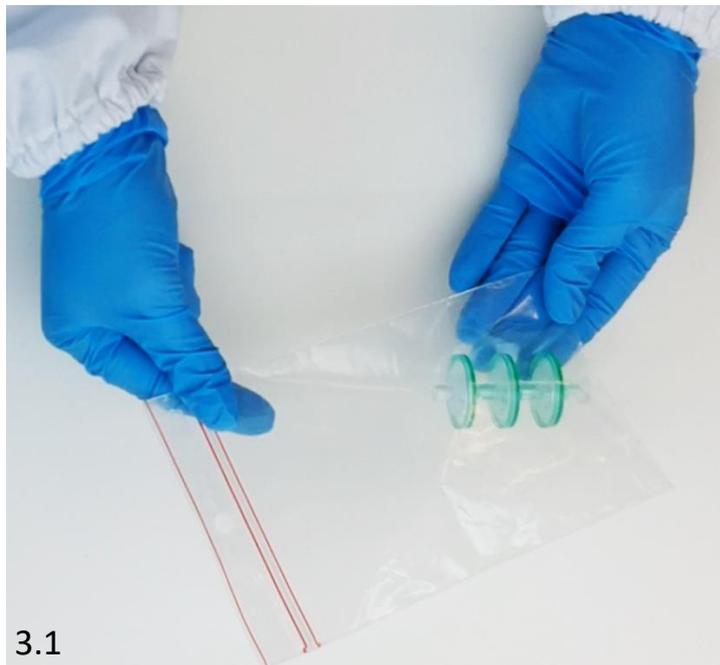

Instructions d'expédition

1. Placer le sac en plastique contenant les filtres dans le carton;
2. Sceller la boîte avec l'autocollant UROMONITOR®;
3. Coller l'étiquette DHL Express fermement sur la surface de l'enveloppe d'expédition DHL. Assurez-vous que l'étiquette soit clairement visible sur une des faces de l'enveloppe d'expédition et que celle-ci ne couvre pas les bords.
4. Contacter votre DHL local pour organiser la collecte de l'échantillon. Un email de confirmation vous sera envoyé dès que le laboratoire UROMONITOR reçoit l'échantillon par DHL.

Des questions? Nous vous aidons.

FAQ: www.uromonitor.com

Les commandes et l'expédition: info@uromonitor.com

Collecte d'échantillons et le traitement: lab@uromonitor.com