



# UROMONITOR

**Instruções para colheita,  
filtragem e envio da amostra**

## Conteúdo do kit de filtragem de urina do UROMONITOR®

- 3 filtros
- 1 seringa 10 mL
- 1 saco de plástico de fecho hermético
- 1 autocolante com o logótipo do UROMONITOR®
- 1 caixa de cartão
- 1 etiqueta expresso da DHL
- 2 tampas para filtros

## Colheita da amostra & processamento

### 1. COLHEITA

1.1 Colha a urina para um frasco de colheita.

(Não fornecido no Kit UROMONITOR®)

Proceda de imediato com a filtragem da amostra ou guarde o frasco a 4°C até ao momento de filtragem (por um período máximo de 4 horas) de modo a preservar a qualidade da amostra e evitar contaminações.



### 2. FILTRAGEM

2.1. Recolha uma amostras de 10 mL de urina do frasco de colheita usando a seringa (Figura 2.1).

2.2. Enrosque um filtro na extremidade da seringa (Figura 2.2)

2.3. Empurre o embolo da seringa, de forma a fazer passar todo o volume de urina através do filtro para um contentor de descarte (Figura 2.3).

2.4. Desenrosque o filtro e repita os passos 2.1 a 2.3 até esgotar a urina ou os filtros fornecidos.

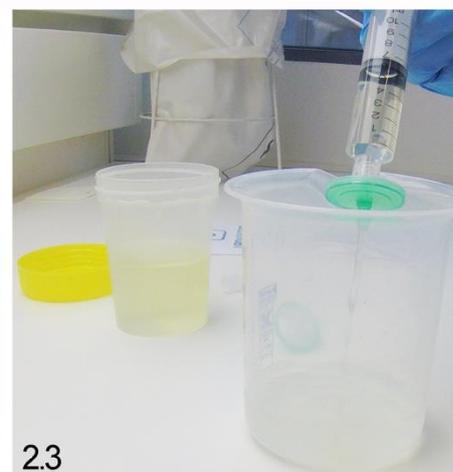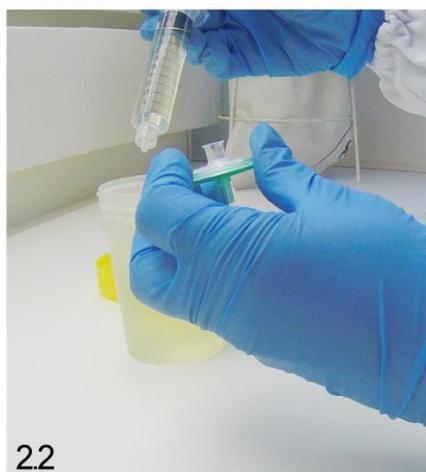


#### IMPORTANTE:

Independentemente do volume de urina colhido a filtragem deve ser feita sempre através de pelo menos 2 filtros.

Caso o filtro colapse e se interrompa o fluxo de urina, troque o filtro por um dos outros que tem disponível e prossiga com a filtragem da amostra.

### 3. ENVIO

3.1. Encaixe os filtros uns nos outros e tape as extremidades livres com as tampas fornecidas; coloque os filtros no mesmo saco de plástico que recebeu com o kit de filtragem de urina do UROMONITOR® (Figura 3.1) e proceda ao envio dos mesmos como explicado na secção de “Instruções de envio”.

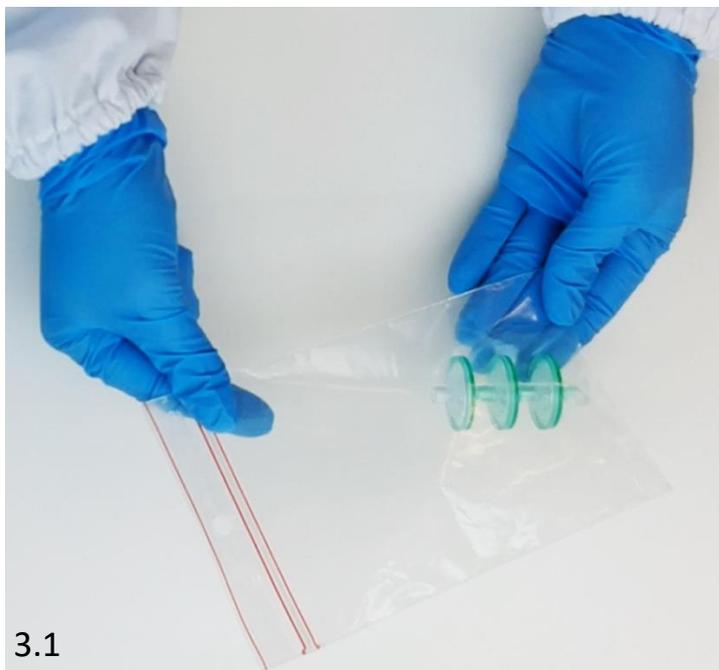

### Instruções de envio

1. Coloque o saco de plástico contendo os filtros na caixa de cartão;
2. Sele a caixa com autocolante com o logótipo do UROMONITOR®;
3. Cole a etiqueta expresso da DHL firmemente na superfície do envelope de envio da DHL. Certifique-se de que a etiqueta está totalmente visível numa das superfícies do envelope de envio e que não cobre nenhum dos rebordos.
4. Contacte a DHL local para agendar a recolha da amostra. Um email de confirmação ser-lhe-á enviado assim que o laboratório do UROMONITOR receber a amostra por parte da DHL.

### Questões? Nós ajudamos.

FAQ: [www.uromonitor.com](http://www.uromonitor.com)

Pedidos e envio: [info@uromonitor.com](mailto:info@uromonitor.com)

Colheita da amostra e processamento: [lab@uromonitor.com](mailto:lab@uromonitor.com)